



# ANLEITUNG ZUM ANTIGEN-NASENBOHRER- TEST (FLOWFLEX-SELBSTTEST)

EXTRAKTIONSPUFFERRÖHRCHEN



EINWEGTUPFER



TESTKASSETTE

SICHERE SCHULE  
www.sichereschule.at

Bundesministerium  
Bildung, Wissenschaft  
und Forschung

**COVID-19 NACHGEWIESEN**  
DIE SCHULE INFORMIERT ELTERN/  
ERZIEHUNGSBERECHTIGTE UND  
DIE ÖRTLICHE GESUNDHEITSBEHÖRDE.

**COVID-19 NICHT NACHGEWIESEN**  
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN  
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!

## WICHTIG

- 30 MINUTEN VOR DEM TEST  
NICHT ZÄHNE PUTZEN, ESSEN ODER RAUCHEN.
- WASSER TRINKEN IST ERLAUBT!

# 1

- Schnäuzen vor dem Test
- Halterung zusammenbauen
- Röhrchen mit Pufferlösung aufschrauben und in die Halterung stellen, ohne es zu drücken
- Stäbchenverpackung mit einer Schere aufschneiden

# 2

- Tupfer ca. 2,5 Zentimeter in ein Nasenloch einführen
- Das Stäbchen 5 Mal drehen, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen
- Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen

# 3

- Röhrchen mit Pufferlösung aus der Halterung nehmen
- Das Stäbchen einführen und 30 Sekunden umrühren
- Röhrchen zusammendrücken und währenddessen das Stäbchen mindestens 5 Mal drehen
- Aufpassen, dass Flüssigkeit nicht aus dem Röhrchen spritzt!

# 4

- Stäbchen entnehmen und dabei Röhrchen zusammendrücken
- Gebrauchtes Stäbchen wieder in die Verpackung schieben
- Kappe mit Tropferspitze fest aufdrehen
- Röhrchen wirbeln und schütteln

# 5

- Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen
- Kappe von der Tropferspitze abdrehen
- Röhrchen vorsichtig zusammendrücken und 4 Tropfen auf Testkassette tropfen (Vertiefung S)

# 6

- 15 Minuten warten
- Das Ergebnis ablesen

# 7

Ergebnisinterpretation

- NEGATIV
- POSITIV
- UNGÜLTIG